

Biokema Pets- ID Standard und Mini

Elektronische Identifikation
Transponder nach ISO 11784/85.

Produkte

- Biokema Pets-ID STANDARD: Geeignet für Hunde, Katzen, Pferde und Esel.
- Biokema Pets-ID MINI: Geeignet für kleine Hunde, Katzen, Frettchen und Nager. NICHT geeignet für grosse Hunde und Pferde.

Gebrauchsanweisung

1. Barcode und Transpondernummer mit Lesegerät prüfen
2. Kanüle mit dem integrierten Transponder auf Injektor setzen
3. Schutzkappe abziehen
4. Transponder lege artis injizieren
5. Nach Injektion Nummerncode mit Lesegerät prüfen

Biokema Pets-ID STANDARD (Grösse 2.12 x 13 mm)

- Bei Hunden und Katzen erfolgt die Injektion subkutan an der linken Halsseite, im oberen Drittel zwischen Ohr und Schulter, in dorso-ventraler Richtung.
- Bei Pferd und Esel erfolgt die Injektion intramuskulär, im mittleren Drittel der linken Halsseite, 4-5 cm unter dem Mähnenansatz (entsprechend der Höhe des Nackenbandes).

Insbesondere bei jungen oder unruhigen Tieren ist eine Lokalanästhesie empfehlenswert.

Biokema Pets-ID MINI (Grösse 1.41 x 9 mm)

- Bei Hunden, Katzen und Frettchen erfolgt die Injektion subkutan an der linken Halsseite, im oberen Drittel zwischen Ohr und Schulter, in dorso-ventraler Richtung.
- Bei Nagern (Hamster, Meerschweinchen, usw.) erfolgt die Injektion subkutan zwischen den Schulterblättern.

Handelsformen pro Produkt

- 12 Transponder und 1 Spritzeninjektor
- Sterile Transponder mit Kanüle
 - Einzeln geblistert
 - ISO FDX-B Standard/Herstellercode 972

Hersteller

Datamars Ibérica S.L.U.