

ViPiBaX SAVANDIS Wundspüllösung

Inhaltsstoffe

Wasser, Kochsalz Natriumhypochloritlösung <0.09% Cl aktiv

- Schmerzfreie Reinigung von Wunden
- Trägt zur Verbesserung des Wundmilieus bei
- Beugt Komplikationen bei der Wundheilung vor
- Frei von Alkohol und pharmazeutischen Substanzen
- Eliminiert Wundgerüche
- Breites Wirkspektrum: Bekämpft Bakterien, Viren und Pilze

Anwendungsmöglichkeiten

Antimikrobielle Wundspülung zur hygienischen Wundversorgung bei äusserer Anwendung am Tier.

Anwendung/Gebrauch

Anwendung: ViPiBaX Savandis direkt in die zu reinigende Wunde einbringen bis alle sichtbaren Verunreinigungen ausgespült wurden. Anschliessend wie gewohnt die Wunde verschliessen. ViPiBaX Savandis hat keine Mindesteinwirkzeit. Reste von ViPiBaX Savandis können problemlos in der Wunde verbleiben. Angetrocknete Verbände können mit Wundspüllösung getränkt werden, um das atraumatische Ablösen des Verbandes zu erleichtern. ViPiBaX Savandis kann unmittelbar vor der Anwendung auf Körpertemperatur angewärmt werden, sollte dann jedoch aufgebraucht werden. Wiederholtes Anwärmen ist zu vermeiden. Die Dauer und Häufigkeit der Anwendung unterliegt keinen Einschränkungen. ViPiBaX Savandis enthält keine dopingrelevanten Bestandteile gemäss ADMR. ViPiBaX Savandis sollte nicht mit anderen zur Wundreinigung verwendeten Gelen, Sprays und Lösungen sowie bereits vorgetränkten Verbänden verwendet werden. ViPiBaX Savandis ist nur für die äusserliche Anwendung bei Hautwunden vorgesehen, Augenkontakt sollte vermieden werden. ViPiBaX Savandis nicht zur Infusion oder Injektion verwenden. Verwenden Sie ViPiBaX Savandis nicht über das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus oder wenn die Flasche über offensichtliche Beschädigungen verfügt. Verbrauchen Sie ViPiBaX Savandis nach Anbruch innerhalb von einer Woche. Nicht offen stehen lassen.

Sonstige Hinweise

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Handelsformen

Flasche 250 ml

Verkaufsart

Beim Tierarzt erhältlich

Hersteller

ViPiBaX GmbH

Garbsener Landstr. 10

30419 Hannover

www.vipibax.de