

Sanocyn^{forte} Spot Gel

Gewebeverträgliches Gel auf Basis von hypochloriger Säure zur Unterstützung eines keimarmen Milieus und für ein optimales Feuchtigkeitsgleichgewicht von Wunden, Hot Spots und beanspruchten Hautpartien

Zusammensetzung

Aktives Chlor freigesetzt aus hypochloriger Säure < 0,1 % (w/v) (0.5 g / l), Wasser, LiMgNa-Silikat, Natriumchlorid

Eigenschaften

Das Spot Gel schafft eine optimale feuchtigkeitsspendende Umgebung, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Es haftet hervorragend und hält zur Trockenheit neigende Wunden feucht und verbessert so Regenerationsbedingungen. Es bildet einen Schutzfilm, verhindert das Verkleben der Wunde mit dem Verbandsmaterial und löst, dort wo nötig, unerwünschten Schorf schnell auf. Geeignet für die unterstützende Behandlung bei dauerhaften Hautproblemen wie zum Beispiel Hot Spots oder auch Sommerekzemen.

Die hervorragende Effizienz der Sanocyn^{forte} Produktlinie basiert auf dem Inhaltsstoff hypochlorige Säure (HOCL), welche auch vom menschlichen Körper im Rahmen natürlicher Abwehrprozesse genutzt wird. Die in Sanocyn^{forte} enthaltene HOCL wird durch ein geschütztes technologisches Verfahren hergestellt. Das Sanocyn^{forte} Spot Gel

- ist schmerzfrei und brennt nicht
- ist frei von Antibiotika
- ist ohne Alkohol
- ist sehr gut hautverträglich
- ist pH neutral
- ist ohne Farb- und Duftstoffe

Anwendungsmöglichkeiten

Geeignet für die unterstützende Behandlung bei Wunden, Schnitten, Insektensticken und dauerhaften Hautproblemen wie zum Beispiel Hot Spots oder auch Sommerekzemen, sowie überall wo Schorf unerwünscht ist. Kann bei allen Säugetieren jeglichen Alters angewendet werden.

Anwendung

Falls erforderlich, entfernen Sie das Fell und reinigen Sie die betroffene Stelle gründlich mit der Sanocyn^{forte} Spüllösung. Tragen Sie das Spot Gel 3 – 4 x täglich grosszügig auf oder nach Angaben ihrer Tierärztin/ihres Tierarztes. Nicht abwischen oder abspülen. Kann auch gut unter Verbänden angewendet werden.

Sonstige Hinweise

Vor Gebrauch gut schütteln und nach Gebrauch verschliessen. Nach dem Öffnen 3 Monate haltbar. Bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser ausspülen. Zur äusserlichen Anwendung. Nach dem Öffnen 3 Monate haltbar.

Packungsgrössen

Flasche à 50 ml

Hersteller

Loxotec GmbH, Liechtensteinstrasse 111 – 115 A-1090 Wien

Vertrieb

ufamed AG
Kornfeldstrasse 2
6210 Sursee

Stand der Informationen

November 2025