

## Sanocyn<sup>forte</sup> Spot Gel

**Gel biocompatible à base d'acide hypochloreux favorisant un environnement pauvre en germes et un équilibre hydrique optimal des plaies, des zones sensibles et des zones cutanées sollicitées.**

### Composition

Chlore actif libéré par l'acide hypochloreux < 0,1 % (w/v) (0.5 g / l), eau, LiMgNa-silicate, chlorure de sodium

### Propriétés

Le Spot Gel crée un environnement hydratant optimal pour favoriser le processus de cicatrisation. Il adhère parfaitement et maintient l'humidité des plaies sujettes à la sécheresse afin d'améliorer les conditions de régénération. Il forme un film protecteur, empêche la plaie d'adhérer au pansement et dissout rapidement les croûtes indésirables là où cela est nécessaire. Convient pour le traitement complémentaire des problèmes cutanés persistants tels que les hot spots ou l'eczéma estival.

L'excellente efficacité de la gamme de produits Sanocyn<sup>forte</sup> repose sur l'acide hypochloreux (HOCL), un composant également utilisé par le corps humain dans le cadre de ses processus de défense naturels. Le HOCL contenu dans Sanocyn<sup>forte</sup> est produit selon un procédé technologique breveté. Le Spot Gel Sanocyn<sup>forte</sup>

est indolore et ne brûle pas la peau

- est sans antibiotiques
- est sans alcool
- est très bien toléré par la peau
- a un pH neutre
- est sans colorants ni parfums

### Utilisation

Convient pour le traitement complémentaire des plaies, coupures, piqûres d'insectes et problèmes cutanés persistants tels que les hot spots ou l'eczéma estival, ainsi que partout où la formation de croûtes est indésirable. Peut être utilisé chez tous les mammifères, quel que soit leur âge.

### Application

Si nécessaire, couper le pelage et nettoyez soigneusement la zone affectée avec la solution de rinçage Sanocyn<sup>forte</sup>. Appliquez généreusement le Spot Gel 3 à 4 fois par jour ou selon les instructions de votre vétérinaire. Ne pas essayer ni rincer. Peut également être utilisé sous des pansements.

**Autres remarques**

Bien agiter avant utilisation et refermer après utilisation. Se conserve 3 mois après ouverture. Conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau. Pour usage externe. Se conserve 3 mois après ouverture.

**Présentation**

Flacon de 50 ml

**Fabricant**

Loxotec GmbH, Liechtensteinstrasse 111 – 115 A-1090 Wien

**Distribution**

ufamed AG  
Kornfeldstrasse 2  
6210 Sursee

**Mise à jour des informations**

Novembre 2025