

Dermapliq Spray

Solution stérile à usage externe pour chiens, chats, chevaux, NAC
Substitut de matrice extracellulaire

Composition:

RGTA (polymères de carboxyméthylglucose sulfate)	750 µg
Excipients q.s.p.	7,5 ml

Propriétés:

Les polymères de carboxyméthylglucose sulfate (RGTA = ReGeneraTing Agents) sont des biopolymères de structure proche de l'héparane sulfate.

Ils permettent l'ancrage des facteurs physiologiques de réparation tissulaire et participent à la protection et au rétablissement de l'intégrité de la matrice extracellulaire impliquée dans les processus de multiplication et de réparation.

L'amélioration de la qualité de la matrice extracellulaire du derme participe à la diminution de sensation d'inconfort de l'animal.

Utilisation:

Chez les chiens, chats, chevaux et NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie): apport local de substitut de matrice extracellulaire.

Mode d'emploi:

Usage externe.

1. Nettoyer la zone concernée.
2. Pulvériser DERMAPLIQ SPRAY en tenant le flacon à environ 5 cm de la zone touchée.
3. Laisser agir une trentaine de secondes avant l'application d'un traitement médicamenteux éventuel ou la pose d'un pansement.

DERMAPLIQ SPRAY s'utilise sur du tissu vivant.

Répéter l'application tous les 2 à 3 jours en fonction de l'évolution. Il est déconseillé d'utiliser le produit quotidiennement. La durée d'utilisation peut varier d'une à plusieurs semaines.

Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d'emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.

Un flacon de 7,5 ml permet environ 50 pulvérisations.

Le système 3K® de la pompe empêche l'entrée de germes ou d'impuretés à l'intérieur du flacon.

Conservation:

DERMAPLIQ SPRAY se conserve dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25 °C.

DERMAPLIQ SPRAY ne contient pas de conservateur.

Utiliser le produit dans le mois qui suit la première pulvérisation.

Présentations:

Boîte de 1 flacon pulvérisateur de 7,5 ml de solution stérile

Fabricant:

Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES

Distributeur:

Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg

Tél. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23

www.virbac.ch