

Dr. E. Graeub AG

Ambugreen™

Barrière en gel pour la peau des animaux d'élevage.

Données scientifiques (données sur les principes actifs de CliniPharm)

- Éthanol
- Zinc

Propriétés

Ambugreen™ est une barrière en gel sans antibiotiques qui protège de manière optimale la peau des animaux d'élevage. Une fois appliqué, Ambugreen™ forme immédiatement une barrière hydrofuge qui, après durcissement, constitue une couche protectrice robuste et souple contre les insectes et la pénétration de germes, d'eau et de saletés. Il est composé d'une résine biodégradable mélangée à des sels métalliques et à de l'éthanol.

Convient pour une application sur toute la peau, les sabots, les coussinets ou le pis. Ne pas appliquer sur les yeux.

Application / Utilisation

1. NETTOYER ET SÉCHER soigneusement la zone concernée
2. Appliquer une fine couche uniforme (max. 3 mm) avec des gants
3. Laisser sécher environ 1 minute
4. Si nécessaire, réappliquer après 24 à 48 heures (par-dessus la couche déjà en place)

Le gel n'adhère pas aux zones de peau humides ou suintantes, ni sur des pommades grasses. Ambugreen™ peut être appliqué par-dessus des sprays non gras.

Autres remarques

Mentions de danger

Liquide et vapeurs facilement inflammables. Provoque une grave irritation des yeux.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter un équipement de protection des yeux. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer.

Conservation

Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit bien aéré. Ne pas conserver au réfrigérateur ni au congélateur. Conserver à température ambiante.

Conditionnements

110 g

Mode de vente : disponible chez le vétérinaire

Fabricant

NoBACZ Healthcare Limited, Cambridge, Royaume-Uni, www.nobacz.com